


IMPLANTOLOGY

プレミアムTGインプラント

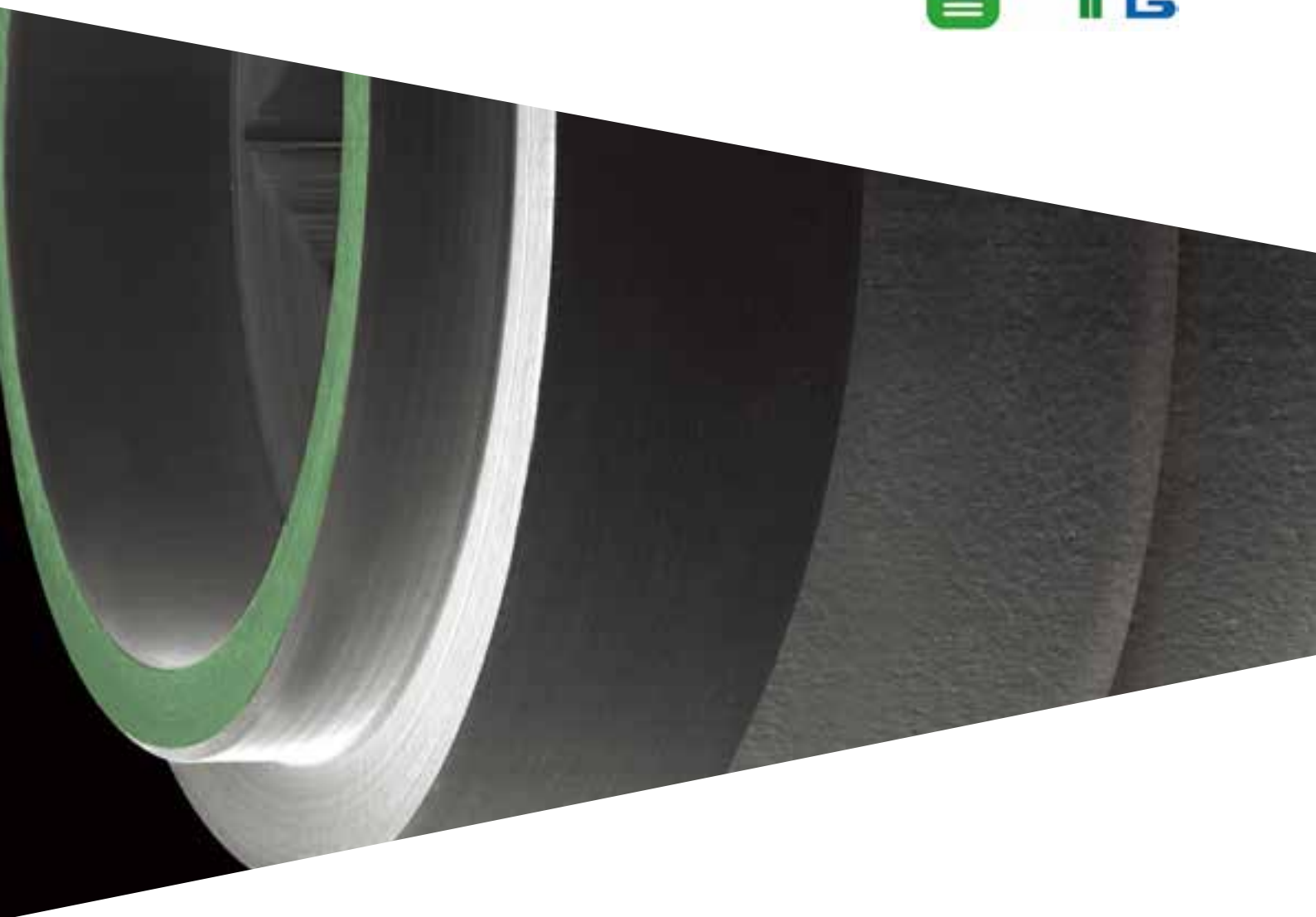

sweden & martina

プレミアムストレート,プレミアムSP,プレミアムTGインプラント

インプラントプレミアムシリーズ（ストレート, スイッチングプラットフォーム「SP」, トランスジジナル「TG」）の特徴は、様々な適応部位に対応するようなインプラントデザインを採用しています。

Ø3.30mmインプラントは、高さ0.8mmのスムーズカラーを持ったシリンダー形状となっています。



Ø 3.30



スレッド部は、ピッチ0.6mmで、深さ0.3mm、50°のトライアングル形状です。



ストレート



全てのプレミアムストレートインプラントは、高さ0.8mmのスムーズカラーを持ったシリンダー形状となっています。



プレミアムインプラントの基本的なスレッドは、ピッチ1mmで、深さ0.4mmです。

ショート

ショートインプラントは、長さ7.0mmと8.5mmがあります。





トランスジジバル (TG)

プレミアムTGインプラントの歯肉貫通部のスムーズカーの高さは、2.2mmです。



スイッチング プラットフォーム (SP)

プレミアム SPインプラントのネックは、歯冠方向に向かって徐々に広がり、インプラント直径よりおよそ0.6mm広がった形状です。



プレミアムTGインプラントの先端は、ラウンド形状です。



プレミアムインプラントの先端部分の3つの切り込みにより、インプラントを挿入しやすくし、セルフタップ能力を高め、一次安定性を改善します。また血液の凝固を促し、長期的にインプラントの回転を防止します。

製品番号一覧

		プレミアム	プレミアムSP
			
		プレミアム	プレミアムSP
インプラント径	長さH	ZirTi	ZirTi
3.30	10	A-ZT-330-100	-
	11.5	A-ZT-330-115	-
	13	A-ZT-330-130	-
	15	A-ZT-330-150	-
3.80	6	-	-
	7	-	-
	8.5	A-ZT-380-085	A-ZT-380SP-085
	10	A-ZT-380-100	A-ZT-380SP-100
	11.5	A-ZT-380-115	A-ZT-380SP-115
	13	A-ZT-380-130	A-ZT-380SP-130
	15	A-ZT-380-150	A-ZT-380SP-150
	18	A-ZT-380-180	-
4.25	6	-	-
	7	A-ZT-425-070	A-ZT-425SP-070
	8.5	A-ZT-425-085	A-ZT-425SP-085
	10	A-ZT-425-100	A-ZT-425SP-100
	11.5	A-ZT-425-115	A-ZT-425SP-115
	13	A-ZT-425-130	A-ZT-425SP-130
	15	A-ZT-425-150	A-ZT-425SP-150
	18	A-ZT-425-180	-
5.00	6	-	-
	7	A-ZT-500-070	A-ZT-500SP-070
	8.5	A-ZT-500-085	A-ZT-500SP-085
	10	A-ZT-500-100	A-ZT-500SP-100
	11.5	A-ZT-500-115	A-ZT-500SP-115
	13	A-ZT-500-130	A-ZT-500SP-130
	15	A-ZT-500-150	A-ZT-500SP-150













プレミアムTG



プレミアムTG













ZirTi	長さH	インプラント径
A-ZT-330TG-100 A-ZT-330TG-115 A-ZT-330TG-130 A-ZT-330TG-150	10 11.5 13 15	3.30
A-ZT-380TG-060 A-ZT-380TG-070 A-ZT-380TG-085 A-ZT-380TG-100 A-ZT-380TG-115 A-ZT-380TG-130 A-ZT-380TG-150 -	6 7 8.5 10 11.5 13 15 18	3.80
A-ZT-425TG-060 A-ZT-425TG-070 A-ZT-425TG-085 A-ZT-425TG-100 A-ZT-425TG-115 A-ZT-425TG-130 A-ZT-425TG-150 -	6 7 8.5 10 11.5 13 15 18	4.25
A-ZT-500TG-060 A-ZT-500TG-070 A-ZT-425TG-085 A-ZT-500TG-100 A-ZT-500TG-115 A-ZT-500TG-130 A-ZT-500TG-150	6 7 8.5 10 11.5 13 15	5.00

プレミアムストレート,プレミアムSP,プレミアムTG 製品一覧

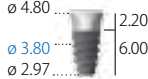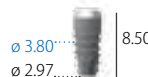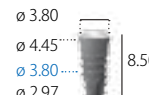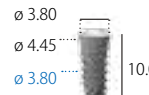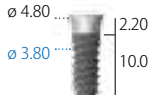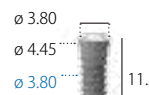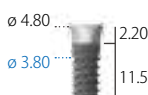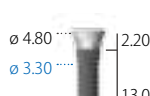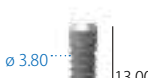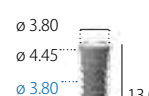L. mm	Ø 3.30 mm			Ø 3.80 mm		
	ストレート	SP	TG	ストレート	SP	TG
6	-	-	-	-	-	 A-ZT-380TG-060
7	-	-	-	-	-	 A-ZT-380TG-070
8.5	-	-	-	 A-ZT-380-085	 A-ZT-380SP-085	 A-ZT-380TG-085
10	 A-ZT-330-100	-	 A-ZT-330TG-100	 A-ZT-380-100	 A-ZT-380SP-100	 A-ZT-380TG-100
11.5	 A-ZT-330-115	-	 A-ZT-330TG-115	 A-ZT-380-115	 A-ZT-380SP-115	 A-ZT-380TG-115
13	 A-ZT-330-130	-	 A-ZT-330TG-130	 A-ZT-380-130	 A-ZT-380SP-130	 A-ZT-380TG-130
15	 A-ZT-330-150	-	 A-ZT-330TG-150	 A-ZT-380-150	 A-ZT-380SP-150	 A-ZT-380TG-150
18	-	-	-	 A-ZT-380-180	※	-
カバー スクリュー	 A-VT-330		 A-TG-VT-M		 A-VT-380	 A-TG-VT-M

- Ø 3.30mmインプラント：プレミアムのØ 3.30mmインプラントは、上下顎の中切歯、側切歯、犬歯に適用されます。小臼歯部、大臼歯部に使用する場合は、より直径の大きいインプラントと使用することを推奨します。
- ショートインプラントは、垂直方向の長さが短いため、長いインプラントとの連結での使用を推奨しています。

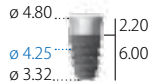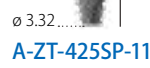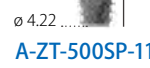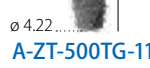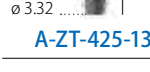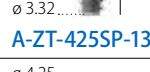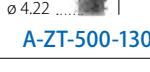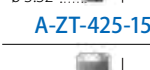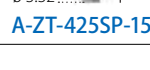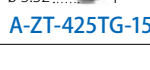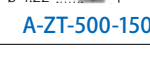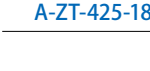

Ø 4.25 mm			Ø 5.00 mm			L. mm
ストレート	SP	TG	ストレート	SP	TG	
-	-	 A-ZT-425TG-060	-	-	 A-ZT-500TG-060	6 ZirTi
 A-ZT-425-070	 A-ZT-425SP-070	 A-ZT-425TG-070	 A-ZT-500-070	 A-ZT-500SP-070	 A-ZT-500TG-070	7 ZirTi
 A-ZT-425-085	 A-ZT-425SP-085	 A-ZT-425TG-085	 A-ZT-500-085	 A-ZT-500SP-085	 A-ZT-500TG-085	8.5 ZirTi
 A-ZT-425-100	 A-ZT-425SP-100	 A-ZT-425TG-100	 A-ZT-500-100	 A-ZT-500SP-100	 A-ZT-500TG-100	10 ZirTi
 A-ZT-425-115	 A-ZT-425SP-115	 A-ZT-425TG-115	 A-ZT-500-115	 A-ZT-500SP-115	 A-ZT-500TG-115	11.5 ZirTi
 A-ZT-425-130	 A-ZT-425SP-130	 A-ZT-425TG-130	 A-ZT-500-130	 A-ZT-500SP-130	 A-ZT-500TG-130	13 ZirTi
 A-ZT-425-150	 A-ZT-425SP-150	 A-ZT-425TG-150	 A-ZT-500-150	 A-ZT-500SP-150	 A-ZT-500TG-150	15 ZirTi
 A-ZT-425-180	※	-	-	-	-	18 ZirTi
 A-VT-425	 A-TG-VT-M	 A-VT-500	 A-TG-VT-W	カバー スクリュー		

プレミアム SPインプラント: 長さはベベルを含みます。特に記載がない場合は、全てmmで記載しております。
 ※は受注発注商品です。


プレミアム TG

プレミアムTGインプラントは、2種類のプラットフォームがあります。

- ・M(Medium)コネクションは外径が4.80mmのプラットフォームです。Ø3.30・3.80・4.25mmのプレミアムTGインプラントはMコネクションとなっています。

- ・W(Wide)コネクションは外径が5.80mmのプラットフォームで、Ø5.00mmのプレミアムTGインプラントのみWコネクションです。

“M” コネクション

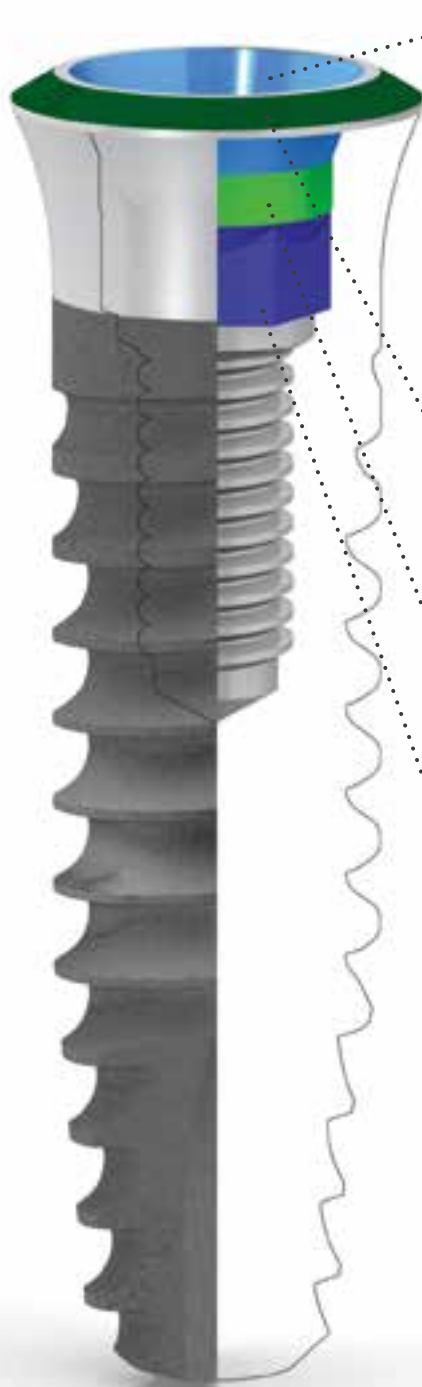

20° コニカルシール

この連結部分は、コニカルフリクションになっており、この摩擦がアバットメントのネジの緩みを防ぎ、菌の侵入を防止します。

連結面

Wコネクションは幅が広いので内部は通常よりも大きい直径で安定性に優れています。さらにカップリング連結により大臼歯や小臼歯部の咬合圧に耐えられる設計となっています。

サポートショルダー

インプラントと補綴の連結のサポートショルダーは幅広い外部ベベルから作られ、30度の角度となっています。


インターナルカラー


プレミアムインプラントのように挿入ドライバーのガイドとなっています。

補綴物の位置決めのための内部ヘキサゴン

プレミアムTGインプラントのヘキサゴンの大きさはプレミアムインプラントのヘキサゴンと同じ構造となっています。この構造によって器具内の外科インスツルメントが共通で使用できます。

“W” コネクション

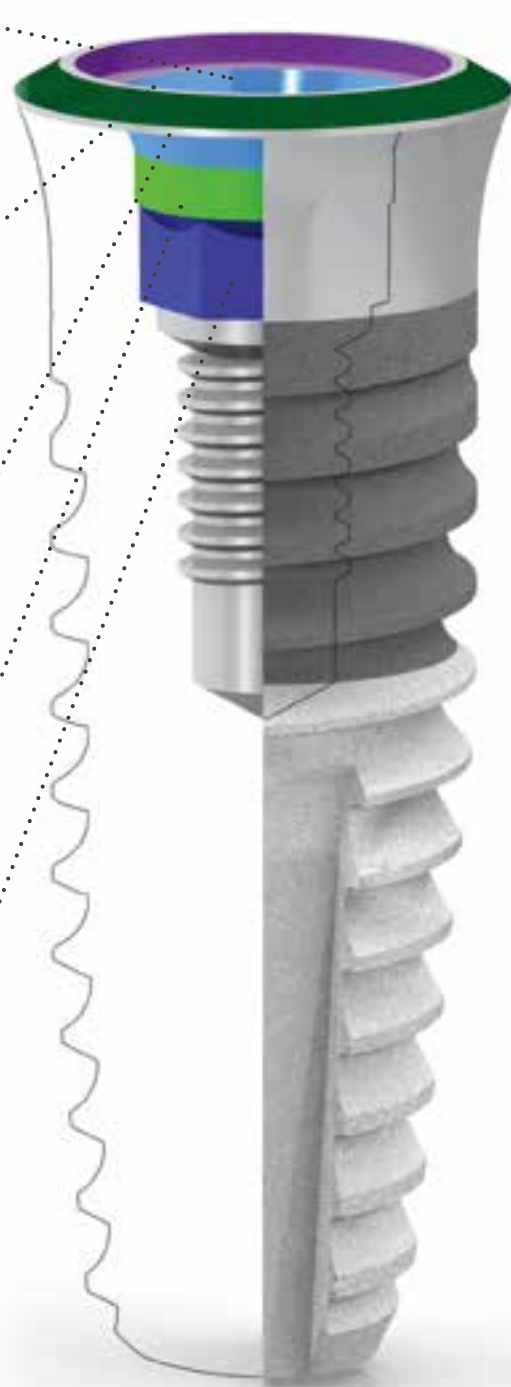

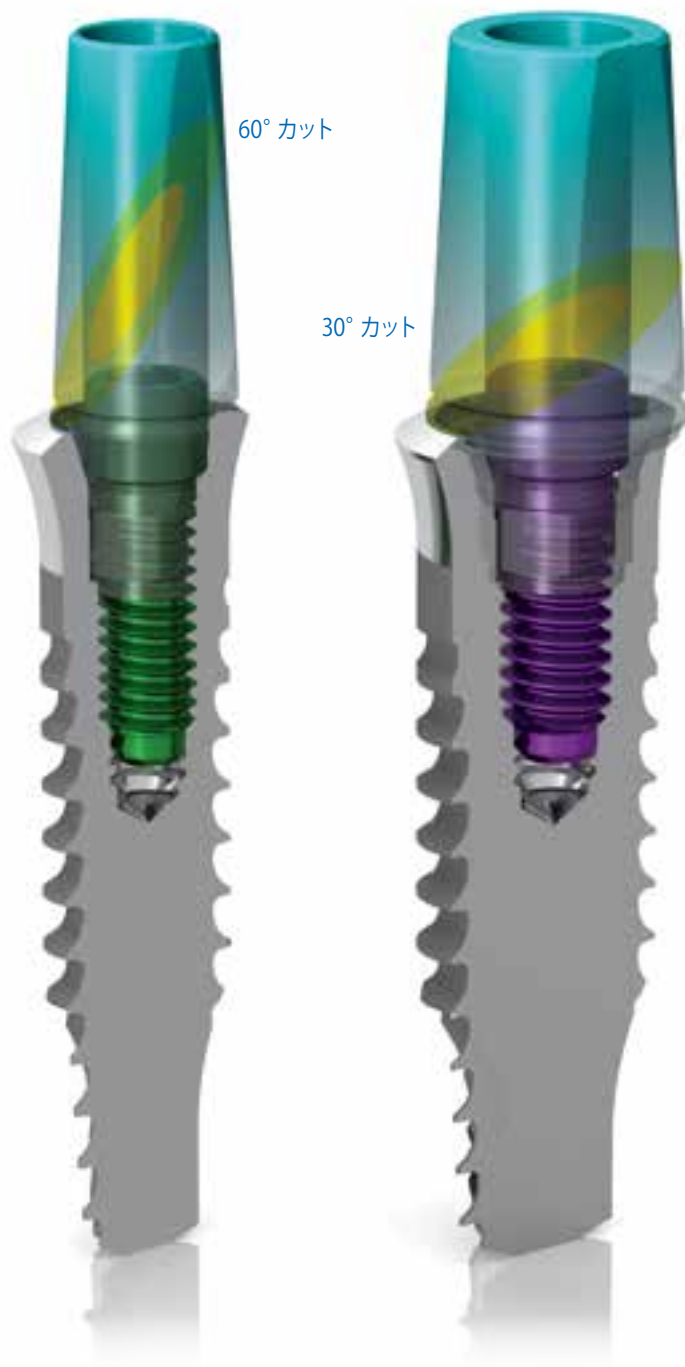

再ポジションが得られるアバットメントと 連結スクリュー

ヘキサゴンのコネクション形状のためアバットメントは元の位置に戻すことが可能です。このアバットメントを取り付けるためのスクリューは低い位置でインプラントに取り付けられるように設計されているため、アバットメントに力が加わっても強度を保つことができ、スクリューの緩みを防止することができます。

このデザインは特許を取得しており、アバットメントを補綴のために切断しなければならない時でもスクリューのヘッドが低いいため可能な限り短くすることができます。

製品一覧

インプラント種類	プレミアム ストレート			
インプラント Ø	3.30 ストレート	3.80 ストレート	4.25 ストレート	5.00 ストレート
サージカルトレイに 対応するカラーコード				
カラーコード (パッケージ)				
Øインプラント最大径 Øインプラント径 (プラットフォーム径) Øエクスターナル カラー径				
カラー部の サイズ				
ヘキサゴン カラーコード				
イージー インサート				
	ヘキサゴン: 2.30 mm	ヘキサゴン: 2.30 mm	ヘキサゴン: 2.50 mm	ヘキサゴン: 2.50 mm
バスケット カラーコード				
ファイナル ドリル径				
	Ø 2.80 mm	Ø 3.00 mm	Ø 3.40 mm	Ø 4.25 mm
フィクセーション スクリュー (スクリューと色)	 M 1.8	 M 1.8	 M 2.0	 M 2.0
印象キャップ カラーコード				
アナログ カラーコード				



プレミアム SP			プレミアム TG				インプラント種類
3.80 SP	4.25 SP	5.00 SP	3.30 TG	3.80 TG	4.25 TG	5.00 TG	インプラント Ø
							サージカルトレイに 対応する カラーコード
							カラーコード (パッケージ)
 Ø 4.45 Ø 3.80 Ø 3.20	 Ø 4.85 Ø 4.25 Ø 3.60	 Ø 5.60 Ø 5.00 Ø 3.90	 Ø 4.80 Ø 3.30	 Ø 4.80 Ø 3.80	 Ø 4.80 Ø 4.25	 Ø 5.80 Ø 5.00	Øインプラント最大径 Øインプラント径 (プラットフォーム径) Øエクスターナル カラー径 カラー部の サイズ
							ヘキサゴン カラーコード
 ヘキサゴン: 2.30 mm	 ヘキサゴン: 2.50 mm	 ヘキサゴン: 2.50 mm	 ヘキサゴン: 2.30 mm	 ヘキサゴン: 2.30 mm	 ヘキサゴン: 2.30 mm	 ヘキサゴン: 2.50 mm	イージー インサート
							バスケット カラーコード
 Ø 3.00 mm	 Ø 3.40 mm	 Ø 4.25 mm	 Ø 2.80 mm	 Ø 3.00 mm	 Ø 3.40 mm	 Ø 4.25 mm	ファイナル ドリル径
 M 1.8	 M 2.0	 M 2.0	 M 1.8	 M 1.8	 M 1.8	 M 2.0	フィクセーション スクリュー (スクリューと色)
							印象キャップ カラーコード
							アナログ カラーコード

イージーインサートを使用した外科術式

インプラント埋入の外科術式は、非常にシンプルです。正確に連結が得られるよう研究されたイージーインサートは、連結部に直接接合されるため、インプラントを埋入するためのマウンターは必要ありません。またインプラントのヘキサゴンを変型させずに、滅菌バイアルからインプラントを簡単に取り外しすることができます。

インプラント ボーンレベル


インプラント ティッシュレベル



イージーインサートを使用することで、術野が広がります。外部ヘキサゴンは内部ヘキサゴンの位置と一致しています。このためインプラント埋入時に補綴位置を目視によって確認しやすくなっています。

特別なチタン製のオーリングによって安全に確実に連結が可能となります。

インプラント内部ヘキサゴンに対し、特許を取得したイージーインサートにより簡単に連結させることができ、インプラント床への埋入を確実に行うことができます。イージーインサートに取り付けられたチタン製のオーリングはインプラントとの連結を確実にし、カラーコードにより識別できます。

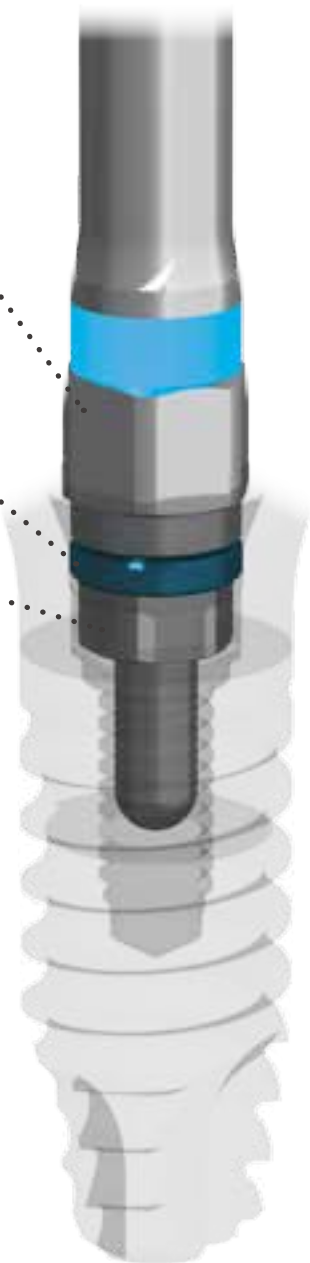




この図は従来型(グリーン)の形状。

連結(グレー)部の角に対して、この形状では.....


外れなくなる現象や変形が発生します。

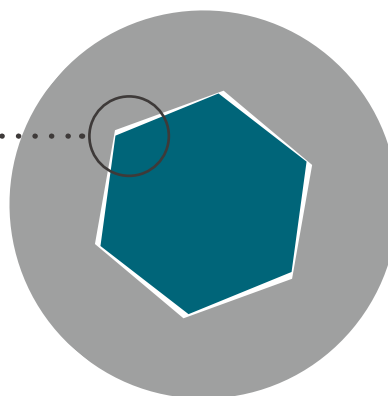

イージーインサートの12角形デザインにより、インプラント連結部の変形を防止し、補綴物の精度を損なうことなくその安定性を獲得できます。

イージーインサート(右側のグリーン)の特殊なデザインは、インプラントとの連結部.....

のヘキサゴン側面の中心に回転力がかかるようになっています。

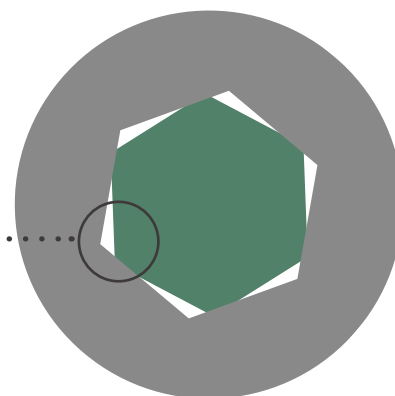

イージーインサートは、青色と赤色にカラーリングされた2種類のサイズがあり、対応するインプラントに挿入します。

	Ø 3.30 mm	Ø 3.80 mm	Ø 4.25 mm	Ø 5.00 mm
プレミアム				
プレミアム SP				
プレミアム TG				

Ø3.30mm・Ø3.80mmのプレミアム/プレミアムSPインプラントには、青色のイージーインサートを使用し、Ø4.25mm・Ø5.00mmには赤色のイージーインサートを使用します。

Ø3.30mm・Ø3.80mm・Ø4.25mmのプレミアムTGインプラントには、青色のイージーインサートを使用し、Ø5.00mmには赤色のイージーインサートを使用します。

TGヒーリングキャップ

TGヒーリングキャップの材質はグレード5チタンです。インプラントスモースカラーの高さ（2.20mm）とTGヒーリングキャップ（1.3mm/2.8mm）の高さを加えたものが、歯肉形成の可能な高さとなります。

TGヒーリングキャップは、HSMシリーズのスクリュードライバーを使用して10Ncmで締め付けてください。HSMシリーズのスクリュードライバーの詳細は、プレミアムカタログP39/P40に記載しています。

TGヒーリングキャップには、ストレートのものとアナトミカルのものがあります。ストレートヒーリングキャップの歯肉貫通部の高さは1.3mmと2.8mmの2種類があります。アナトミカルヒーリングキャップには、高さが1.3mm・2.8mm・4.3mmの3種類があります。

TGストレートヒーリングキャップW28:
“W” プラットフォームで高さ2.8mm
※ストレートヒーリングキャップはインプラント連結部（プラットフォーム）と最上部の直径が同じです。


..... サポート: TGキャップはインプラントネックのベベル部で支えています。



TGアナトミカルヒーリングキャップM54, 28: “M”プラットフォームで高さ2.8mm、54はヒーリングキャップの最上部の直径を表しています。

※アナトミカルヒーリングキャップはインプラント連結部（プラットフォーム）と最上部の直径は違っている。最上部の径はØ5.40mmとØ6.40mmの2種類がある。

..... ガイドシリンダー: インプラント埋入時にセンタリングが可能です。

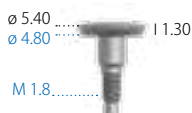コネクション	M	W
TGストレート ヒーリングキャップ トランスジジバル 高さ 1.3 mm	 $\phi 4.80$..... M 1.8..... 1.30 A-TG-TMG-M-13	 $\phi 5.80$..... M 2.0..... 1.30 A-TG-TMG-W-13
TGストレート ヒーリングキャップ トランスジジバル 高さ 2.8 mm	 $\phi 4.80$..... M 1.8..... 2.80 A-TG-TMG-M-28	 $\phi 5.80$..... M 2.0..... 2.80 A-TG-TMG-W-28
TGアナトミカル ヒーリングキャップ トランスジジバル 高さ 1.3 mm	 $\phi 5.40$..... $\phi 4.80$..... M 1.8..... 1.30 A-TG-TMGR-M-13	 $\phi 6.40$..... $\phi 5.80$..... M 2.0..... 1.30 A-TG-TMGR-W-13
TGアナトミカル ヒーリングキャップ トランスジジバル 高さ 2.8 mm	 $\phi 5.40$..... $\phi 4.80$..... M 1.8..... 2.80 A-TG-TMGR-M-28	 $\phi 6.40$..... $\phi 5.80$..... M 2.0..... 2.80 A-TG-TMGR-W-28
TGアナトミカル ヒーリングキャップ トランスジジバル 高さ 4.3mm	 $\phi 5.40$..... $\phi 4.80$..... M 1.8..... 4.30 A-TG-TMGR-M-43	 $\phi 6.40$..... $\phi 5.80$..... M 2.0..... 4.30 A-TG-TMGR-W-43

印象採得と模型作成

印象と模型製作に関わる製品は、フィクスチャーの製造と同じ機械で製造されています。これにより製造による誤差を最小限に抑えています。

ピックアップ印象キャップは、陽極酸化処理されたグレード5チタン製でプラットフォームごとにカラーコードで色分けされているため、使用する直径が分かりやすくなっています。プルアップ印象キャップは、X線不透過のPEEK製でインプラントに正しく装着されているかを確認することができます。



インプラントアナログ：陽極酸化処理されたしカラーコードにより技工作業を行う際に容易にパーツを識別できます。


プルアップトランスファー：インプラントの内部へキサゴンに挿入し、特別な維持機構によりスクリューの必要がなく、カチッと固定することができます。

ピックアップ印象：上部は維持の良い設計になっているため、印象内での固定が非常に安定しています。


アナログ プレミアムTG

コネクション	M	W
アナログ TG	 ø 4.80..... 14.60 A-TG-ANA-M	 ø 5.80..... 14.60 A-TG-ANA-W

プルアップ印象キャップ プレミアムTG

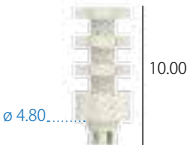コネクション	M	W
プルアップ 印象キャップ TG	 ø 4.80..... 10.00 A-TG-TRAP-M	 ø 5.80..... 10.00 A-TG-TRAP-W

ピックアップ印象キャップ プレミアムTG

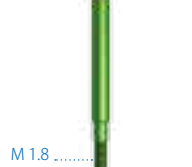コネクション	M	W
ピックアップ 印象キャップ TG	 ø 4.80..... 10.00 A-TG-TRA-M	 ø 5.80..... 10.00 A-TG-TRA-W
スクリュー付き		
フィクセーション スクリュー ピックアップ印象用TG	 M 1.8..... A-TG-VTRA-180-20	 M 2.0..... A-TG-VTRA-200-20
1個入り		

注意:ポリマー素材のプルアップ印象は、正確な印象採得を保证するために毎回新しい印象/パーツをご使用ください。
PEEKの技術的な特徴については、プレミアムインプラントP66をご参照ください。

フィクセーションスクリューの推奨トルク: 20-25 Ncm

特に記載がない場合は、全てmmで記載しております。

シンプルテンポラリーポスト

シンプルにテンポラリーを製作するための補綴パーツです。骨統合後、またはインプラントの埋入後に即時負荷で使用する場合は、通常通りに使用します。また、軟組織の調整のためのトランスジジバルヒーリングキャップの代用として使用することもできます。






PEEKは、チェアサイドで簡単に切削することができる耐久性・生体適合性に優れた高いポリマーです。セメント固定のシングルクラウンに使用します。



ヘキサゴンが回転を防止し、シングルクラウンのスクリー固定式テンポラリーの製作が可能です



ヘキサゴンがないため、複数に渡るスクリー固定式テンポラリーブリッジの製作が可能です。

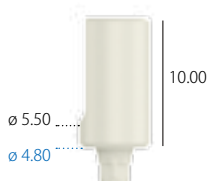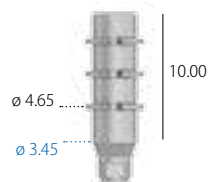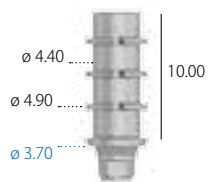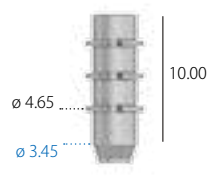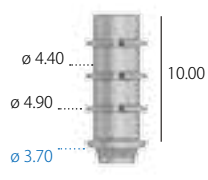コネクション	M	W
ピーク印象キャップTG スクリュー付き	 A-TG-MPSP-M	 A-TG-MPSP-W
チタン印象キャップ (角) TG スクリュー付き	 A-TG-MPST-M	 A-TG-MPST-W
チタン印象キャップ (丸) TG スクリュー付き	 A-TG-MPST-M-ROT	 A-TG-MPST-W-ROT
フィクセーションスクリューTG 1個入り 10個入り	 M 1.8 A-TG-VM-180 A-TG-VM-180-10	 M 2.0 A-TG-VM-200 A-TG-VM-200-10

PEEKの技術的な特徴については、プレミアムインプラントP66をご参照ください。

フィクセーションスクリュー推奨トルク: 20-25 Ncm.

特に記載がない場合は、全てmmで記載しております。





未承認品が含まれております。

TGストレートポスト

TGストレートポストは、アクセスホールよりHSMシリーズのスクリュードライバーを使用し締め付けてください。



ヘキサゴン:インプラントの内部ヘキサゴンにより位置を固定し回転を防止します。

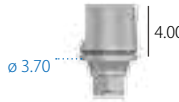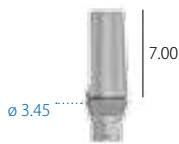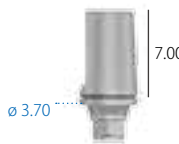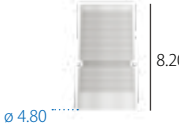コネクション	M	W
TG ストレートポスト角 高さ 4 mm スクリュー付き	 A-TG-MR-M-40	 A-TG-MR-W-40
TG ストレートポスト角 高さ 7 mm スクリュー付き	 A-TG-MR-M-70	 A-TG-MR-W-70
TG ストレートポスト用 キャスタブルキャップ (角)	 A-TG-CAPCM-M	 A-TG-CAPCM-W
TG ストレートポスト用 キャスタブルキャップ (丸)	 A-TG-CAPCM-M-ROT	 A-TG-CAPCM-W-ROT
フィクセーションスクリュー-TG 1個入り 10個入り	 A-TG-VM-180 A-TG-VM-180-10	 A-TG-VM-200 A-TG-VM-200-10

POMの技術的な特徴については、プレミアムインプラントP65をご参照ください。

備考: TG ストレートポストは、スクリューリテインのためインプラントレベルで印象採得してください。

注意: 口腔内に最終的に補綴物を装着する際は、新しいスクリューで締め付けてください。

フィクセーションスクリュー推奨トルク: 20-25 Ncm.







特に記載がない場合は、全てmmで記載しております。

未承認品が含まれております。

TGアングルポスト

グレード5チタンのTGアングルポストは、インプラントジョルダー上に設置します。鋳造した合金よりもPMMA製のキャストブスリーブは耐性が低いため、技工操作時にキャストブスリーブをスクリューで固定する場合、6-8Ncm以上の力を加えないようにしてください。

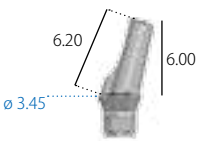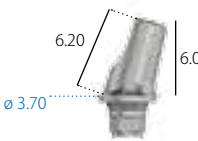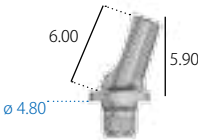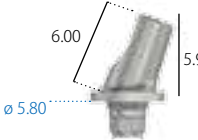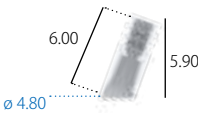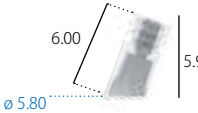

コネクション	M	W
TGアングルポスト15° (角) スクリュー付き	 A-TG-MAR15-M-60	 A-TG-MAR15-W-60
TGアングルポスト20° (角) スクリュー付き	 A-TG-MAPA20-M	 A-TG-MAPA20-W
TGアングルポスト20° 用 キャストブスリーブ PMMA スクリュー付き	 A-TG-CC-MAPA-M	 A-TG-CC-MAPA-W
フィクセーションスクリュー-TG 1個入り 10個入り	 A-TG-VM-180 A-TG-VM-180-10	 A-TG-VM-200 A-TG-VM-200-10
TGアングルポスト20° 用 キャストブスリーブ PMMA用スクリュー 1個入り 10個入り	 A-TG-VP-140 A-TG-VP-140-10	 A-TG-VP-140 A-TG-VP-140-10

PEEKの技術的な特徴については、プレミアムインプラントP66をご参照ください。

注意：口腔内に最終的に補綴物を装着する際は、新しいスクリューで締め付けてください。

フィクセーションスクリュー推奨トルク値：20-25 Ncm。キャストブスリーブのPMMA用スクリューの推奨トルク値：6～8Ncm
技工操作時にキャストブスリーブをスクリューで固定する場合、6-8Ncm以上の力を加えないようにしてください。

特に記載がない場合は、全てmmで記載しております。

未承認品が含まれております。



販売名: プレミアムインプラントZirTi	医療機器承認番号: 22600BZX00088000
販売名: プレミアムTGインプラントZirTi	医療機器承認番号: 22600BZX00248000
販売名: プレミアム・コーノ・TGアナログ	医療機器製造販売届出番号: 27B1X00041002065
販売名: プレミアム・コーノ・TG印象キャップ	医療機器製造販売届出番号: 27B1X00041002066
販売名: ピーク印象キャップ	医療機器製造販売届出番号: 27B1X00041002091
販売名: チタン製プレミアム・コーノ・TG印象キャップ	医療機器製造販売届出番号: 27B1X00041002067
販売名: TG鑄造用プラスチックコーピング	医療機器製造販売届出番号: 27B1X00041002106



大信貿易株式会社
DAISHIN TRADING CO.,LTD.

本社〒592-8346 大阪府堺市西区浜寺公園町3-231-3

<http://www.daishintrading.co.jp>

大信受注センター

tel.0120-382-118 fax.0120-089-118

※プレミアムインプラントのカタログも併せてご参照下さい。