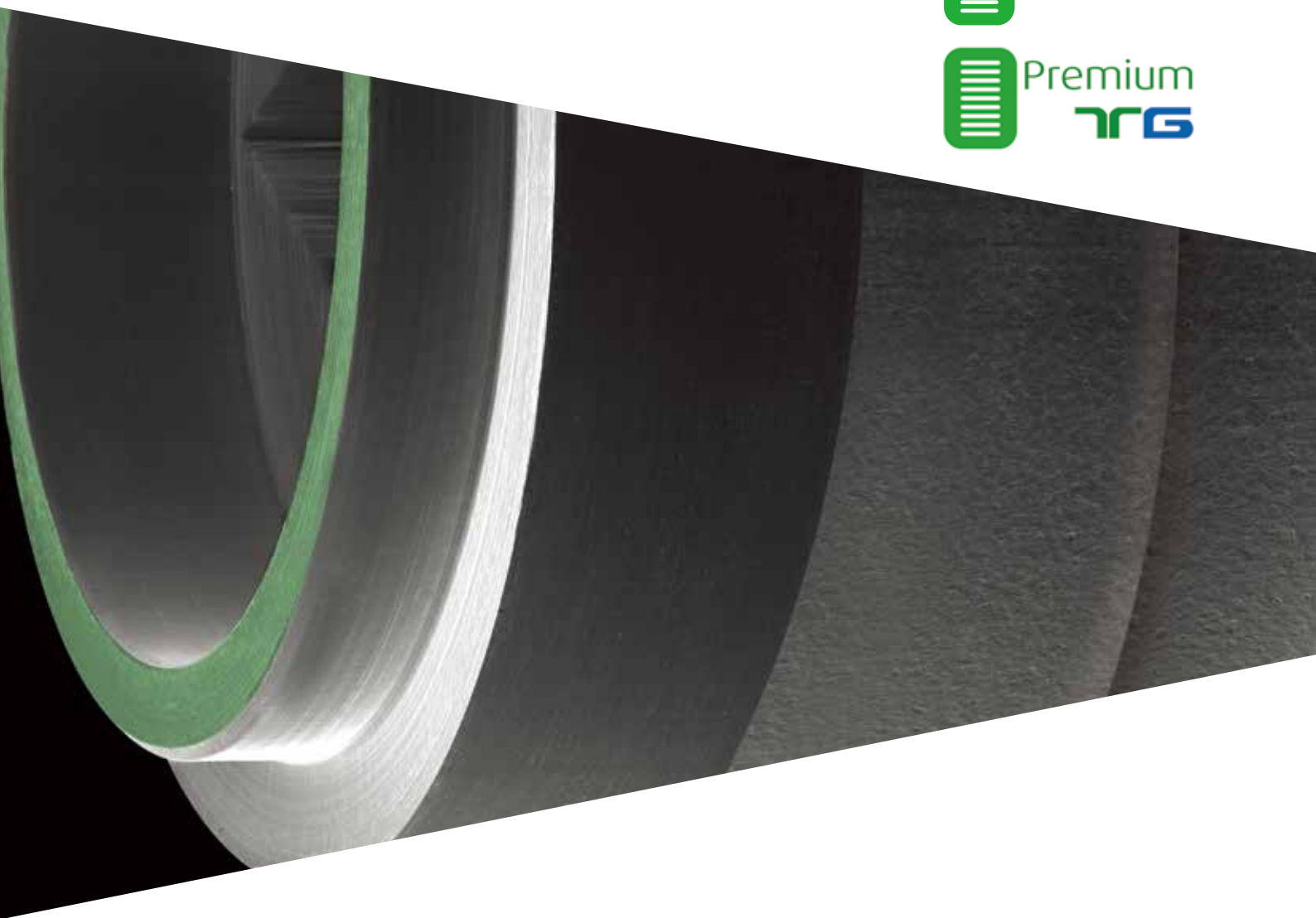
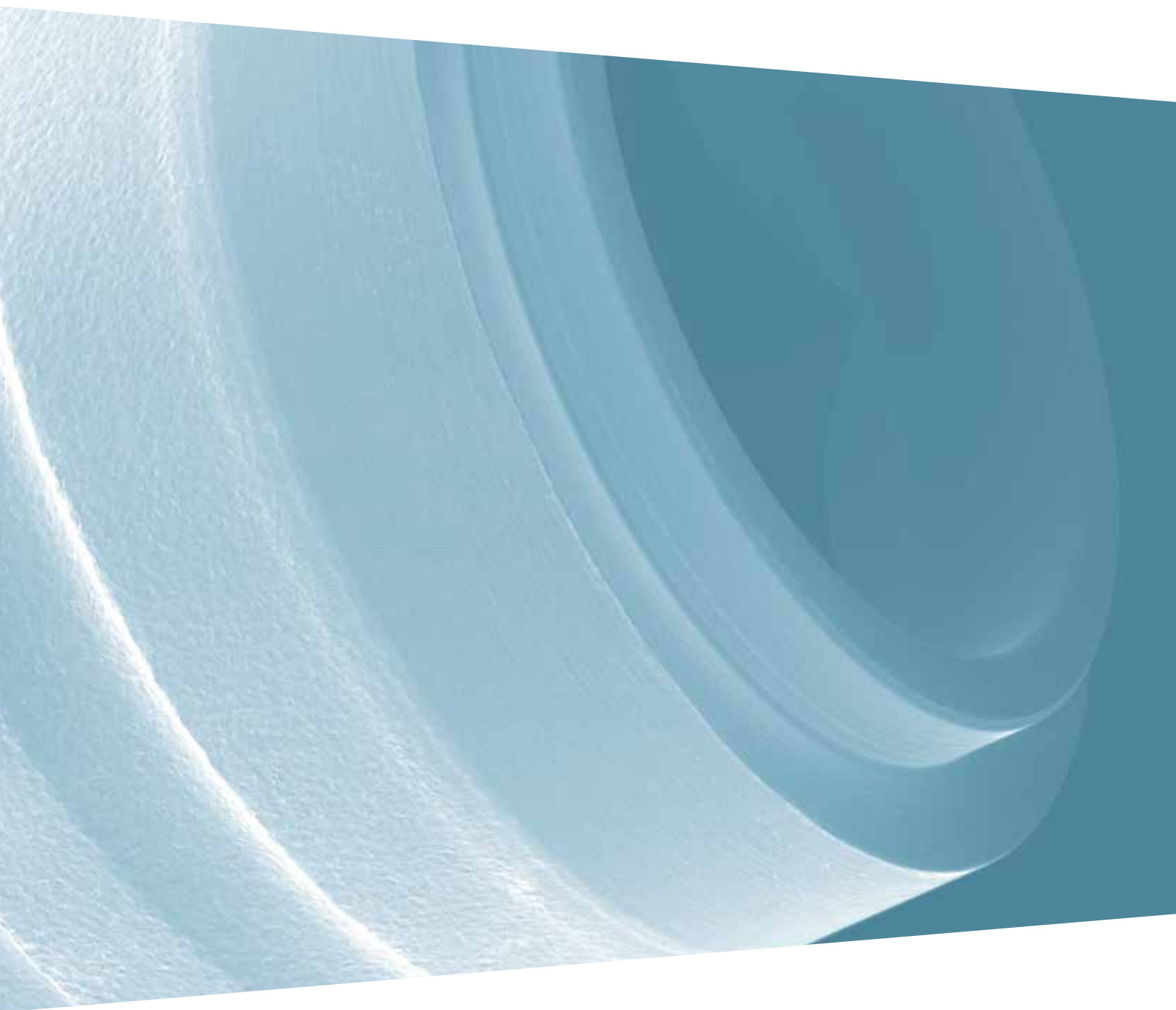


# IMPLANTOLOGY

補綴パーツ関連製品





プレミアム ストレート・SP印象採得と模型製作

プレミアム ストレート・SP補綴パーツ

プレミアム ストレート・SPオーバーデンチャー

プレミアム TG印象採得と模型製作

プレミアム TG補綴パーツ

## 印象採得と模型製作

印象と模型製作に関わる製品は、フィクスチャーと同じ製造ラインで製造されています。これにより製造による誤差を最小限に抑えています。

ピックアップ印象キャップとプルオフ印象キャップは、陽極酸化処理されたグレード5チタン製でプラットフォームごとにカラーコードで色分けされているため、使用する直径が分かりやすくなっています。プルアップ印象キャップは、X線不透過のPEEK製でインプラントに正しく装着されているかを確認することができます。

### ピックアップ印象：

印象採得する場合スクリューによって印象キャップを固定します。この場合、オープントレーを使用します。最も正確な印象採得が可能です。

### プルオフ印象：

クローズドトレイ印象の簡便性とスクリューリテインによる印象キャップの正確性を持った印象システムです。

### ..... インプラントアナログ：

陽極酸化処理されたカラーコードにより技工作業を行う際に容易にパーツを識別できます。



### プルアップ印象：

インプラントの内部のヘキサゴンに直接挿入し、特別な維持機構によりスクリューの必要がなく、簡単に印象採得することができます。

## アナログ プレミアム (ストレート、SP)

コネクション

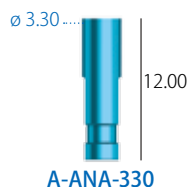
Ø 3.30 mm

Ø 3.80 mm

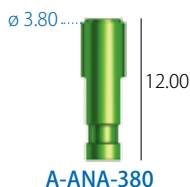
Ø 4.25 mm

Ø 5.00 mm

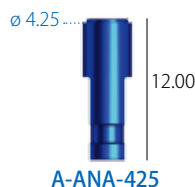
アナログ  
プレミアム



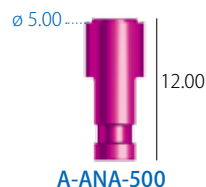
A-ANA-330



A-ANA-380

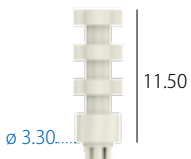
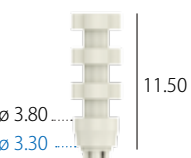
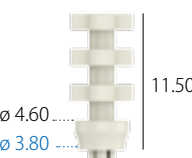
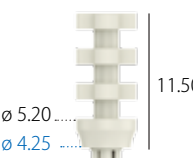
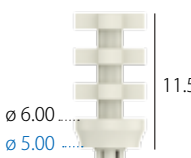


A-ANA-425

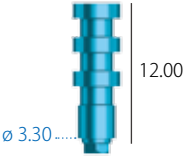
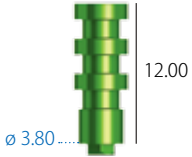
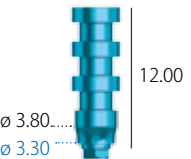
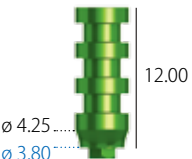
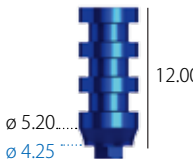
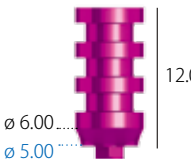
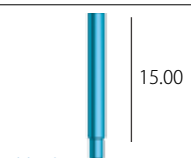
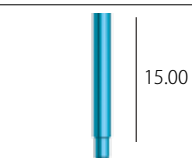
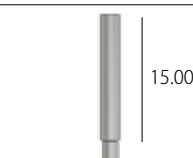
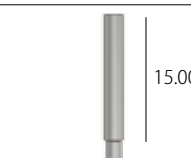


A-ANA-500

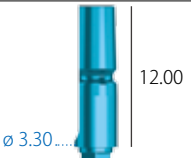
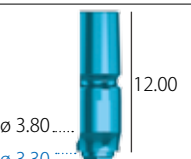
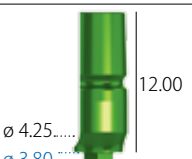
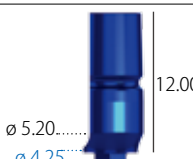
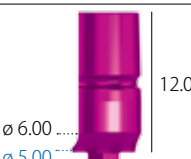
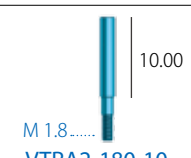
## プルアップ印象キャップ プレミアム (ストレート、SP)

| コネクション                    | Ø 3.30 mm                                                                                                                           | Ø 3.80 mm                                                                                                                           | Ø 4.25 mm                                                                                                                           | Ø 5.00 mm                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プルアップ<br>印象キャップ<br>ストレート  | <br>11.50<br>Ø 3.30<br><b>A-TRAP-330</b>           | -                                                                                                                                   | -                                                                                                                                   | -                                                                                                                                     |
| プルアップ<br>印象キャップ<br>アナトミカル | <br>11.50<br>Ø 3.80<br>Ø 3.30<br><b>A-TRAP-330</b> | <br>11.50<br>Ø 4.60<br>Ø 3.80<br><b>A-TRAP-380</b> | <br>11.50<br>Ø 5.20<br>Ø 4.25<br><b>A-TRAP-425</b> | <br>11.50<br>Ø 6.00<br>Ø 5.00<br><b>A-TRAP-500</b> |

## ピックアップ印象キャップ プレミアム (ストレート、SP)

|                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ピックアップ<br>印象キャップ<br>ストレート<br>プレミアム<br>Fスクリュー付   | <br>12.00<br>Ø 3.30<br><b>A-TRA-330</b>              | <br>12.00<br>Ø 3.80<br><b>A-TRA-380</b>              | -                                                                                                                                     | -                                                                                                                                       |
| ピックアップ<br>印象キャップ<br>アナトミカル<br>プレミアム<br>Fスクリュー付  | <br>12.00<br>Ø 3.80<br>Ø 3.30<br><b>A-TRAR-330</b> | <br>12.00<br>Ø 4.25<br>Ø 3.80<br><b>A-TRAR-380</b> | <br>12.00<br>Ø 5.20<br>Ø 4.25<br><b>A-TRAR-425</b> | <br>12.00<br>Ø 6.00<br>Ø 5.00<br><b>A-TRAR-500</b> |
| Fスクリュー<br>ピックアップ印象用<br>プレミアム<br>長さ15mm<br>1 個入り | <br>15.00<br>M 1.8<br><b>VTRA2-180-15</b>          | <br>15.00<br>M 1.8<br><b>VTRA2-180-15</b>          | <br>15.00<br>M 2.0<br><b>VTRA2-200-15</b>          | <br>15.00<br>M 2.0<br><b>VTRA2-200-15</b>          |

## プルオフ印象キャップ プレミアム (ストレート、SP)

|                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プルオフ<br>印象キャップ<br>ストレート<br>プレミアム<br>Fスクリュー付   | <br>12.00<br>Ø 3.30<br><b>A-TRAS-330</b>           | -                                                                                                                                     | -                                                                                                                                     | -                                                                                                                                       |
| プルオフ<br>印象キャップ<br>アナトミカル<br>プレミアム<br>Fスクリュー付  | <br>12.00<br>Ø 3.80<br>Ø 3.30<br><b>A-TRAS-330</b> | <br>12.00<br>Ø 4.25<br>Ø 3.80<br><b>A-TRAS-380</b> | <br>12.00<br>Ø 5.20<br>Ø 4.25<br><b>A-TRAS-425</b> | <br>12.00<br>Ø 6.00<br>Ø 5.00<br><b>A-TRAS-500</b> |
| Fスクリュー<br>プルオフ印象用<br>プレミアム<br>長さ10mm<br>1 個入り | <br>10.00<br>M 1.8<br><b>VTRA2-180-10</b>          | <br>10.00<br>M 1.8<br><b>VTRA2-180-10</b>          | <br>10.00<br>M 2.0<br><b>VTRA2-200-10</b>          | <br>10.00<br>M 2.0<br><b>VTRA2-200-10</b>          |

注意：正確な印象採得を保証するために毎回新しい印象パーツをご使用ください。  
フィクセーションスクリューの推奨トルク値：20-25 Ncm

# テンポラリーポスト（ストレート、SP）

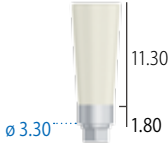
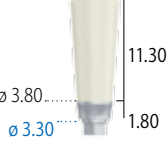
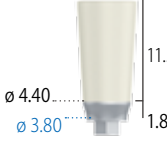
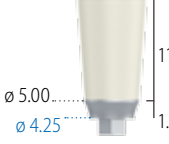
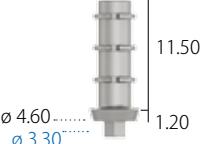
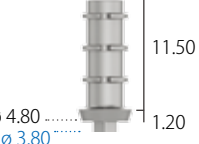
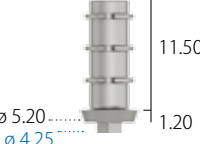
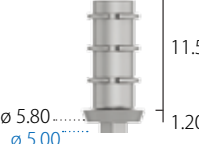
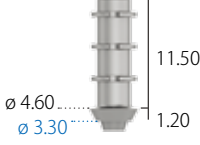
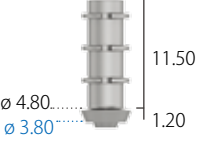
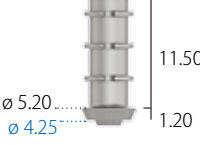
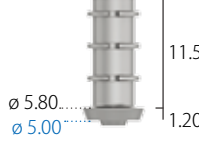
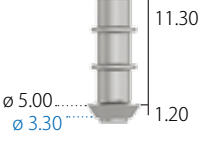
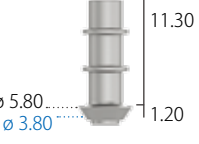
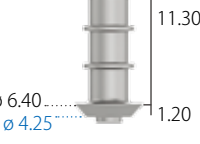
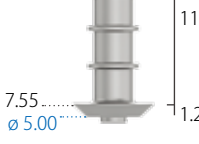
テンポラリーを製作するための補綴パーツです。骨統合後、またはインプラントの埋入後、通法に従い使用します。また、軟組織の調整のためのトランスジジバルヒーリングキャップの代用として使用することもできます。

- PEEKは、チェアサイドで簡単に切削することができる耐久性・生体適合性に優れたポリマーです。チタン製のベースは、ストレートまたはアノミカルの立ち上がり形態をもった2種類のタイプがあります。セメント固定のシングルクラウンに使用します。

歯肉貫通部の形態が広がっており、形成によってどのような形態にも調整することができます。歯肉の審美的なコンディショニングをシンプルに素早く行えます。

ヘキサゴンがないため、インプラントの平行性がない場合でも、複数に渡るスクリュー固定式テンポラリーブリッジの製作が可能です。

ヘキサゴンが回転を防止し、シングルクラウンのスクリュー固定式テンポラリーの製作が可能です。

| コネクション                                                    | Ø 3.30 mm                                                                                          | Ø 3.80 mm                                                                                          | Ø 4.25 mm                                                                                           | Ø 5.00 mm                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ピーク印象キャップ<br>(角)<br><br>PEEK/チタンベース<br>ストレート<br>Fスクリュー付き  | <br>A-MPSC-330    |                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                      |
| ピーク印象キャップ<br>(角)<br><br>PEEK/チタンベース<br>アナトミカル<br>Fスクリュー付き | <br>A-MPSCR-330   | <br>A-MPSCR-380   | <br>A-MPSCR-425    | <br>A-MPSCR-500   |
| チタン印象キャップ<br>(角)<br>プレミアム<br>Fスクリュー付き                     | <br>A-MPSA-330-EX | <br>A-MPSA-380-EX | <br>A-MPSA-425-EX | <br>A-MPSA-500-EX |
| チタン印象キャップ<br>(丸)<br>プレミアム<br>Fスクリュー付き                     | <br>A-MPSA-330  | <br>A-MPSA-380  | <br>A-MPSA-425  | <br>A-MPSA-500  |
| チタン印象キャップ<br>ワイド (丸)<br>プレミアム<br>Fスクリュー付き                 | <br>A-MPS-330   | <br>A-MPS-380   | <br>A-MPS-425   | <br>A-MPS-500   |
| Fスクリュー<br>プレミアム                                           | <br>M 1.8       | <br>M 1.8       | <br>M 2.0        | <br>M 2.0       |
| 1 個入り<br>10 個入り                                           | VM2-180<br>VM2-180-10                                                                              | VM2-180<br>VM2-180-10                                                                              | VM2-200<br>VM2-200-10                                                                               | VM2-200<br>VM2-200-10                                                                                |

PEEKの技術的な特徴については、プレミアムインプラントカタログP.66をご参照ください。

注意：口腔内に最終的に補綴物を装着する際は、新しいスクリューで締め付けてください。

フィクセーションスクリュー推奨トルク値：20-25 Ncm



### プレミアムポスト（ストレート、SP）

このグレード5チタンのアバットメントは、陽極酸化処理により黄金色となっています。  
酸化処理によりもたらされた黄金色は、コーティングではありませんので、生体適合性に優れています。  
アバットメントはアクセスホールより、ドライバーで締め付けます。

#### カラー：

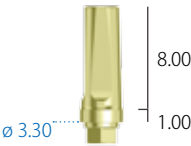
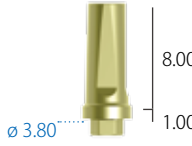
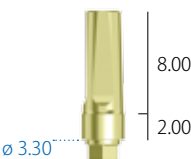
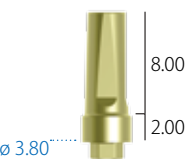
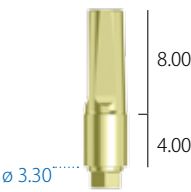
黄金色は、審美部位での補綴物の製作を理想的にします。

アングルアバットメント：  
角度15°と25°

#### ヘキサゴン：

インプラントの内部ヘキサゴンにより位置を固定し、回転を防止します。



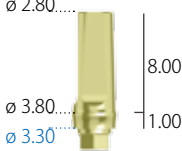
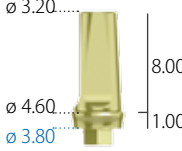
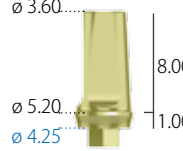
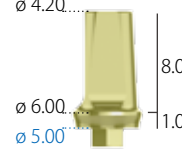
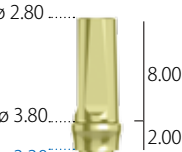
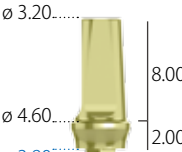
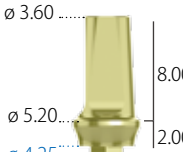
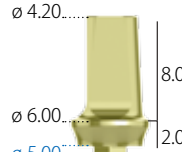
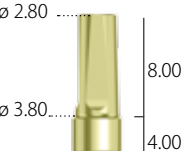
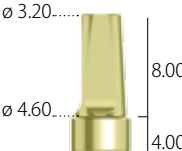
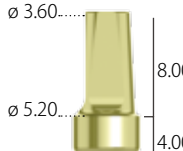
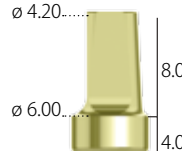
| コネクション                                               | Ø 3.30 mm                                                                                        | Ø 3.80 mm                                                                                       | Ø 4.25 mm | Ø 5.00 mm |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| プレミアム<br>ストレートポスト<br>トランスジジナル<br>高さ 1 mm<br>Fスクリュー付き | <br>A-MD-330-1  | <br>A-MD-380-1 | -         | -         |
| プレミアム<br>ストレートポスト<br>トランスジジナル<br>高さ 2 mm<br>Fスクリュー付き | <br>A-MD-330-2  | <br>A-MD-380-2 | -         | -         |
| プレミアム<br>ストレートポスト<br>トランスジジナル<br>高さ 4 mm<br>Fスクリュー付き | <br>A-MD-330-4 | -                                                                                               | -         | -         |
| Fスクリュー<br>プレミアム                                      | <br>M 1.8     | <br>M 1.8    | -         | -         |
| 1 個入り<br>10 個入り                                      | VM2-180<br>VM2-180-10                                                                            | VM2-180<br>VM2-180-10                                                                           |           |           |

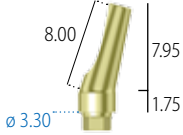
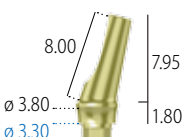
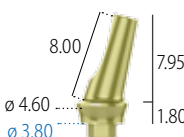
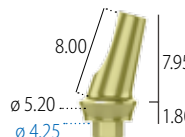
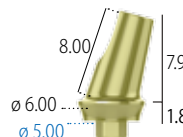
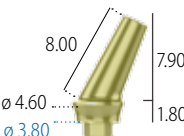
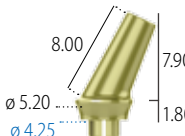
注意：口腔内に最終的に補綴物を装着する際は、新しいスクリューで締め付けてください。

フィクセーションスクリュー推奨トルク値：20-25 Ncm

特に記載がない場合は、全てmmで記載しております。

## 補綴パーツ

| コネクション                                                    | Ø 3.30 mm                                                                                         | Ø 3.80 mm                                                                                         | Ø 4.25 mm                                                                                         | Ø 5.00 mm                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プレミアム<br>アナトミカルポスト<br><br>トランスジジナル<br>高さ 1 mm<br>Fスクリュー付き | <br>A-MDR-330-1  | <br>A-MDR-380-1  | <br>A-MDR-425-1  | <br>A-MDR-500-1  |
| プレミアム<br>アナトミカルポスト<br><br>トランスジジナル<br>高さ 2 mm<br>Fスクリュー付き | <br>A-MDR-330-2  | <br>A-MDR-380-2  | <br>A-MDR-425-2  | <br>A-MDR-500-2  |
| プレミアム<br>アナトミカルポスト<br><br>トランスジジナル<br>高さ 4 mm<br>Fスクリュー付き | <br>A-MDR-330-4 | <br>A-MDR-380-4 | <br>A-MDR-425-4 | <br>A-MDR-500-4 |
| Fスクリュー<br>プレミアム                                           | <br>M 1.8      | <br>M 1.8      | <br>M 2.0      | <br>M 2.0      |
| 1個入り<br>10 個入り                                            | VM2-180<br>VM2-180-10                                                                             | VM2-180<br>VM2-180-10                                                                             | VM2-200<br>VM2-200-10                                                                             | VM2-200<br>VM2-200-10                                                                               |

| コネクション                                                                 | Ø 3.30 mm                                                                                        | Ø 3.80 mm                                                                                          | Ø 4.25 mm                                                                                          | Ø 5.00 mm                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プレミアム<br>ストレート<br>アングルポスト 15°<br><br>トランスジジナル<br>高さ 1.75 mm<br>Fスクリー付き | <br>A-MA15-330  | -                                                                                                  | -                                                                                                  | -                                                                                                  |
| プレミアム<br>アノミカル<br>アングルポスト 15°<br><br>トランスジジナル<br>高さ 1.8 mm<br>Fスクリー付き  | <br>A-MAR15-330 | <br>A-MAR15-380   | <br>A-MAR15-425   | <br>A-MAR15-500 |
| プレミアム<br>アノミカル<br>アングルポスト 25°<br><br>トランスジジナル<br>高さ 1.8 mm<br>Fスクリー付き  | -                                                                                                | <br>A-MAR25-380 | <br>A-MAR25-425 | -                                                                                                  |
| Fスクリー<br>プレミアム                                                         | <br>M 1.8     | <br>M 1.8       | <br>M 2.0       | <br>M 2.0     |
| 1個入り<br>10 個入り                                                         | VM2-180<br>VM2-180-10                                                                            | VM2-180<br>VM2-18 0                                                                                | VM2-200<br>VM2-200-10                                                                              | VM2-200<br>VM2-200-10                                                                              |

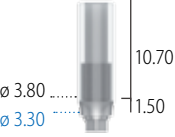
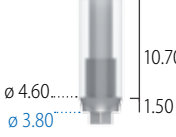
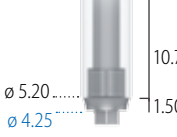
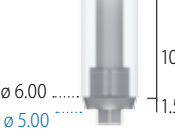
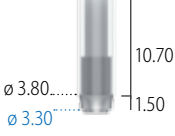
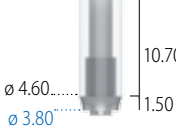
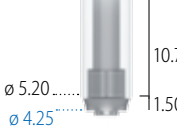
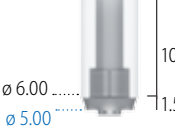
フィクセーションスクリュー推奨トルク値 :20-25 Ncm

注意: 口腔内に最終的に補綴物を装着する際は、新しいスクリューで締め付けてください。

### キャストブルポスト（ストレート、SP）

キャストブルポストのベース部は、高い生体適合性を持つ鋳接用貴金属合金を使用しています。



| コネクション                                                               | Ø 3.30 mm                                                                                                                      | Ø 3.80 mm                                                                                                    | Ø 4.25 mm                                                                                                    | Ø 5.00 mm                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プレミアム<br>キャストブルポスト<br>(角)<br><br>gold alloy "1"<br>アノミカル<br>Fスクリュー付き | <br>A-UCR-330-EX                              | <br>A-UCR-380-EX            | <br>A-UCR-425-EX            | <br>A-UCR-500-EX            |
| プレミアム<br>キャストブルポスト<br>(丸)<br><br>gold alloy "1"<br>アノミカル<br>Fスクリュー付き | <br>A-UCR-330                                 | <br>A-UCR-380               | <br>A-UCR-425               | <br>A-UCR-500               |
| プレミアム<br>スペアキャスト<br>スリーブ                                             | <br>A-CCUCR-330                              | <br>A-CCUCR-380            | <br>A-CCUCR-425            | <br>A-CCUCR-500            |
| Fスクリュー<br>プレミアム                                                      | <br>1個入り<br>10 個入り<br>VM2-180<br>VM2-180-10 | <br>VM2-180<br>VM2-180-10 | <br>VM2-200<br>VM2-200-10 | <br>VM2-200<br>VM2-200-10 |

gold alloy "1"の技術的な特徴については、プレミアムインプラントカタログP.66をご参照ください。

フィクセーションスクリュー推奨トルク値：20-25 Ncm

注意：口腔内に最終的に補綴物を装着する際は、新しいスクリューで締め付けてください。

### P.A.D (ストレート、SP)

P.A.D.アングルアバットメントは傾斜埋入されたインプラントにとってシンプルかつ適切なソリューションとなります。

ストレートアバットメント (ジンジバル-高さ1.5mm/3mm/4mmに対応)

アングルアバットメント (30° /17°、ジンジバル-高さ3mm/5mmに対応)

P.A.D.補綴システムは、スクリュー固定による幅広い用途に適したシステムです。

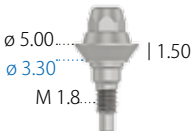
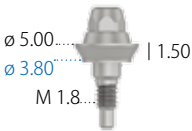
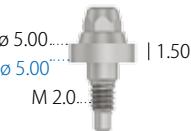
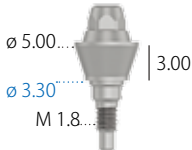
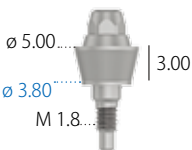
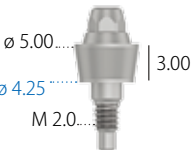
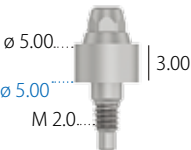
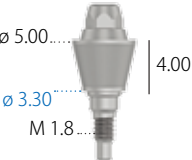
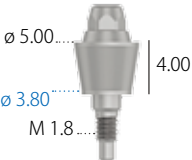
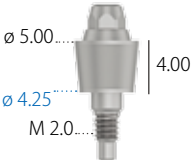
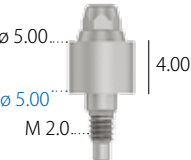
P.A.D.アバットメント: 全て15°の角度のついたアッパーコーンになっており、多様な補綴物の装着・取り外しの操作を容易にします。





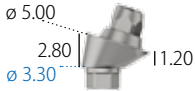
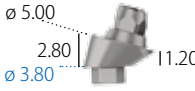
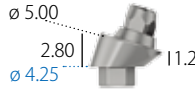
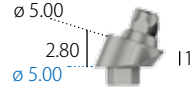
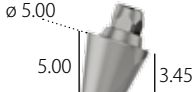
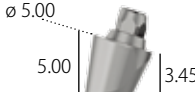
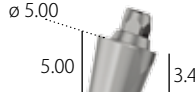
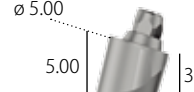
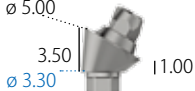
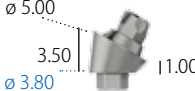
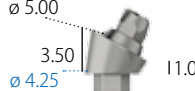
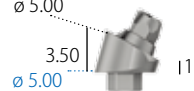
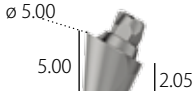
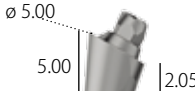
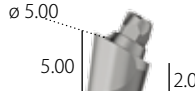
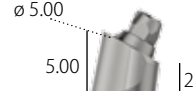


## ストレートP.A.D. (ストレート、SP)

| コネクション                                       | Ø 3.30 mm                                                                                            | Ø 3.80 mm                                                                                            | Ø 4.25 mm                                                                                             | Ø 5.00 mm                                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ストレート<br>PAD アバットメント<br>トランスジジナル<br>高さ1.5 mm | <br>A-PAD-AD330-15  | <br>A-PAD-AD380-15  | <br>A-PAD-AD425-15  | <br>A-PAD-AD500-15  |
| ストレート<br>PAD アバットメント<br>トランスジジナル<br>高さ3mm    | <br>A-PAD-AD330-30  | <br>A-PAD-AD380-30  | <br>A-PAD-AD425-30  | <br>A-PAD-AD500-30  |
| ストレート<br>PAD アバットメント<br>トランスジジナル<br>高さ4mm    | <br>A-PAD-AD330-40 | <br>A-PAD-AD380-40 | <br>A-PAD-AD425-40 | <br>A-PAD-AD500-40 |

ストレートPADアバットメント推奨トルク値: 20-25 Ncm.

# アングル P.A.D. (ストレート、SP)

| コネクション                                                    | Ø 3.30 mm                                                                                              | Ø 3.80 mm                                                                                              | Ø 4.25 mm                                                                                              | Ø 5.00 mm                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17° アングル<br>PAD アバットメント<br>トランスジジバル<br>高さ 3 mm<br>スクリュー付き | <br>A-PAD-AA330-173   | <br>A-PAD-AA380-173   | <br>A-PAD-AA425-173   | <br>A-PAD-AA500-173   |
| 17° アングル<br>PAD アバットメント<br>トランスジジバル<br>高さ 5 mm<br>スクリュー付き | <br>A-PAD-AA330-175   | <br>A-PAD-AA380-175   | <br>A-PAD-AA425-175   | <br>A-PAD-AA500-175   |
| 30° アングル<br>PAD アバットメント<br>トランスジジバル<br>高さ 3 mm<br>スクリュー付き | <br>A-PAD-AA330-303   | <br>A-PAD-AA380-303   | <br>A-PAD-AA425-303   | <br>A-PAD-AA500-303   |
| 30° アングル<br>PAD アバットメント<br>トランスジジバル<br>高さ 5 mm<br>スクリュー付き | <br>A-PAD-AA330-305 | <br>A-PAD-AA380-305 | <br>A-PAD-AA425-305 | <br>A-PAD-AA500-305 |
| D<br>フィクセーション<br>スクリュー                                    | <br>M 1.8           | <br>M 1.8           | <br>M 2.0           | <br>M 2.0           |
| 1個入り<br>10個入り                                             | PAD-VM-180<br>PAD-VM-180-10                                                                            | PAD-VM-180<br>PAD-VM-180-10                                                                            | PAD-VM-200<br>PAD-VM-200-10                                                                            | PAD-VM-200<br>PAD-VM-200-10                                                                              |

## 製品コード



PAD-CAR

### アングルPADアバットメント用キャリアー

アングルを所定の位置にキャリングするためのインスツルメントです。  
滅菌可能で繰り返し、使用いただけます。  
(サージカルキットに含まれておりません。)



### ストレートPADドライバー

## AVV2-ABUT

ストレートPADアバットメントには、アバットメントをキャリングするためのプラスチックのインスツルメントがパッケージに含まれています。

注意：口腔内に最終的に補綴物を装着する際は、新しいスクリューで締め付けてください。

PADフィクセーションスクリュー推奨トルク値: 20-25 Ncm.

特に記載がない場合は、全てmmで記載しております。

## 補綴パーツ

### 製品コード



PAD-CG

PADヒーリングキャップ (グレード5チタン製)  
PAD補綴用フィクセーションスクリュー付き (製品コード PAD-VP-140)

締め付けトルク 8-10Ncm  
※アバットメントにテンポラリークラウンを装着しない場合に使用ください。



PAD-CAP

PADプルアップ印象キャップ (丸) (POM製)



PAD-CAP-EX

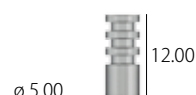
PADプルアップ印象キャップ (角) (POM製)



PAD-TRA

PADピックアップ印象キャップ (丸) (グレード5チタン製)  
PADピックアップ印象キャップ用スクリュー付き (コードPAD-VTRAL-140)

オープントレー用



PAD-TRA-EX

PADピックアップ印象キャップ (角) (グレード5チタン製)  
PADピックアップ印象キャップ用スクリュー付き (コードPAD-VTRAL-140)

オープントレー用



PAD-VTRAL-140

PADピックアップ印象キャップ用スクリュー

ピックアップ印象キャップに含まれています。  
※スペアとして注文可



PAD-ANA

PADアバットメント用アナログ (グレード5チタン製)



PAD-CC

PADアバットメント用 casting スリーブ (丸) (PMMA製)  
PAD補綴用フィクセーションスクリュー付き

注意: 締付トルク値は20-25Ncm  
铸造用スリーブを模型へ締める場合は、耐性がないため、  
トルク値が8-10Ncmを超えないように注意してください。



PAD-CC-EX

PADアバットメント用 casting スリーブ (角) (PMMA製)  
PAD補綴用フィクセーションスクリュー付き

注意: 締付トルク値は20-25Ncm  
铸造用スリーブを模型へ締める場合は、耐性がないため、  
トルク値が8-10Ncmを超えないように注意してください。

## 製品コード



PAD-CP

PADアバットメント用PEEKスリーブ (丸)  
PAD補綴用フィクセーションスクリュー付き

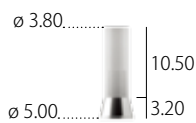
締め付けトルク値20-25Ncm  
暫間補綴用



PAD-CP-EX

PADアバットメント用PEEKスリーブ (角)  
PAD補綴用フィクセーションスクリュー付き

締め付けトルク値20-25Ncm  
暫間補綴用



PAD-UC

PADゴールドコーピング (丸) (gold alloy "1"/PMMA製)  
PAD補綴用フィクセーションスクリュー付き

締め付けトルク値20-25Ncm



PAD-VP-140

PAD補綴用フィクセーションスクリュー

PAD補綴用フィクセーションスクリューを使用する製品に含まれています。  
スペアとして注文可。10個入りパックもございます。(コード PAD-VP-140-10)

## P.A.D. セメント合着用パーツ

## 製品コード



PAD-CT

PADチタンキャップ (丸)  
PAD補綴用フィクセーションスクリュー付き (コード PAD-VP-140)

締め付けトルク値20-25Ncm



PAD-CT-EX

PADチタンキャップ (角)  
PAD補綴用フィクセーションスクリュー付き (コード PAD-VP-140)

締め付けトルク値20-25Ncm



PAD-CCEM

PADチタンキャップ用鑄造スリーブ

PMMA製ワックスアップ用



PAD-VP-140

PAD補綴用フィクセーションスクリュー

PAD補綴用フィクセーションスクリューを使用する製品に含まれています。  
スペアとして注文可。10個入りパックもございます。(コード PAD-VP-140-10)

gold alloy "1"とPMMAの技術的な特徴については、プレミアムインプラントカタログP.65・66をご参照ください。

PAD補綴フィクセーションスクリュー推奨トルク値: 20-25 Ncm.

特に記載がない場合は、全てmmで記載しております。 未承認品が含まれております。

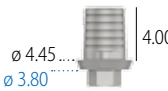
### チタンベース(ストレート、SP)

カスタムアバットメントやインプラントブリッジを製作する場合のチタンベースです。  
プレミアムストレート/SPに対応しております。

#### チタンベース:

ミリング・焼成されたジルコニアフレーム／クラウンに装着されたチタンベースは、インプラントとパーフェクトな接合を可能にします。



| コネクション                         | Ø 3.30 mm                                                                         | Ø 3.80 mm                                                                         | Ø 4.25 mm                                                                         | Ø 5.00 mm                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| プレミアム<br>チタンベース(角)<br>Fスクリュー付き |  |  |  |  |
|                                | A-BASTZR-S-330-4                                                                  | A-BASTZR-S-380-4                                                                  | A-BASTZR-S-425-4                                                                  | A-BASTZR-S-500-4                                                                    |
| プレミアム<br>チタンベース(丸)<br>Fスクリュー付き | NO PHOTO                                                                          | NO PHOTO                                                                          | NO PHOTO                                                                          | NO PHOTO                                                                            |
|                                | A-BASTZR-M-330-6                                                                  | A-BASTZR-M-380-6                                                                  | A-BASTZR-M-425-6                                                                  | A-BASTZR-M-500-6                                                                    |
| Fスクリュー<br>プレミアム                |  |  |  |  |
| 1個入り<br>10個入り                  | VM2-180<br>VM2-180-10                                                             | VM2-180<br>VM2-180-10                                                             | VM2-200<br>VM2-200-10                                                             | VM2-200<br>VM2-200-10                                                               |

注意：口腔内に最終的に補綴物を装着する際は、新しいスクリューで締め付けてください。

フィクセーションスクリュー推奨トルク値: 20-25 Ncm.

特に記載がない場合は、全てmmで記載しております。

## トライインキット

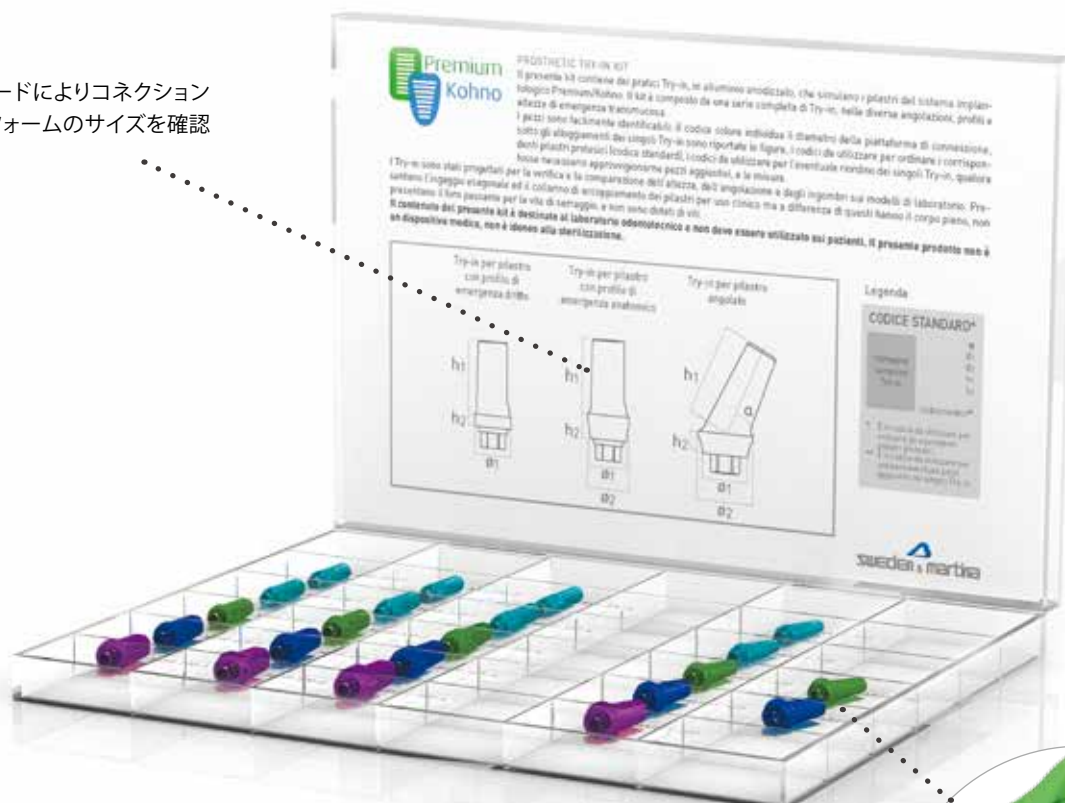
トライインキットは、陽極酸化処理されたアルミニウム製です。

模型上で設計する際に補綴パーツの選択や確認をすることができます。

上部には、最終補綴用に注文される各ポストの製品コードがあり、右下にはトライインの製品コードがあります。

(注文時にご使用ください)

カラーコードによりコネクション  
プラットフォームのサイズを確認  
できます。



トライインは、特殊な六角構造により  
安定したフリクションが得られます。



## 製品コード



DT-SET

デンタルテクニシャンセット





プレミアム ストレート、SP、TG

---

プレミアム ストレート・SP印象採得と模型製作

プレミアム ストレート・SP補綴パーツ

プレミアム ストレート・SPオーバーデンチャー

プレミアム TG印象採得と模型製作

プレミアム TG補綴パーツ

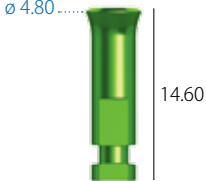
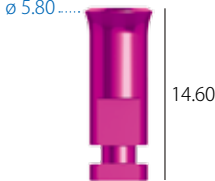
# 印象採得と模型製作

印象と模型製作に関わる製品は、フィクスチャーと同じ製造ラインで製造されています。これにより製造による誤差を最小限に抑えています。

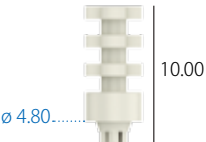
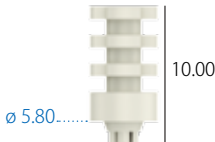
ピックアップ印象キャップは、陽極酸化処理されたグレード5チタン製でプラットフォームごとにカラーコードで色分けされているため、使用する直径が分かりやすくなっています。プルアップ印象キャップは、X線不透過のPEEK製でインプラントに正しく装着されているかを確認することができます。



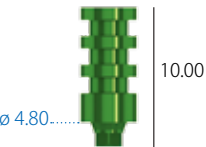
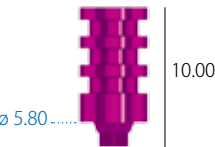
## アナログ プレミアム (TG)

| コネクション     | M                                                                                                                           | W                                                                                                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アナログ<br>TG |  <p>ø 4.80<br/>14.60</p> <p>A-TG-ANA-M</p> |  <p>ø 5.80<br/>14.60</p> <p>A-TG-ANA-W</p> |

## プルアップ印象キャップ プレミアム (TG)

| コネクション                | M                                                                                                                             | W                                                                                                                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プルアップ<br>印象キャップ<br>TG |  <p>ø 4.80<br/>10.00</p> <p>A-TG-TRAP-M</p> |  <p>ø 5.80<br/>10.00</p> <p>A-TG-TRAP-W</p> |

## ピックアップ印象キャップ プレミアム (TG)

| コネクション                                                        | M                                                                                                                             | W                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ピックアップ<br>印象キャップ<br>TG<br><br>Fスクリュー<br>ピックアップ<br>印象キャップTG用付き |  <p>ø 4.80<br/>10.00</p> <p>A-TG-TRA-M</p> |  <p>ø 5.80<br/>10.00</p> <p>A-TG-TRA-W</p> |
| Fスクリュー<br>ピックアップ<br>印象キャップTG用<br><br>1個入り                     |  <p>M 1.8</p> <p>A-TG-VTRA-180-20</p>      |  <p>M 2.0</p> <p>A-TG-VTRA-200-20</p>       |

注意:正確な印象採得を保証するために毎回新しい印象パーツをご使用ください。  
 PEEKの技術的な特徴については、プレミアムインプラントカタログP.66をご参照ください。  
 フィクセーションスクリューの推奨トルク: 20-25 Ncm

特に記載がない場合は、全てmmで記載しております。

# テンポラリーポスト (TG)

テンポラリーを製作するための補綴パーツです。骨統合後、またはインプラントの埋入後、通法に従い使用します。  
また、軟組織の調整のためのトランスジジバルヒーリングキャップの代用として使用することもできます。

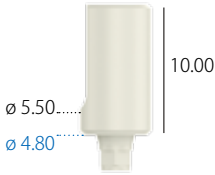
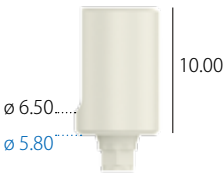
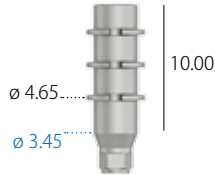
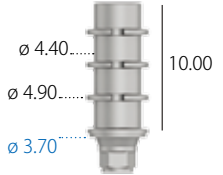
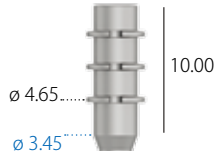
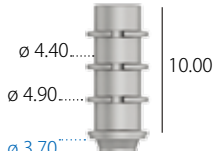
PEEKは、チェアサイドで簡単に切削することができる耐久性・生体適合性に優れたポリマーです。セメント固定のシングルクラウンに使用します。



ヘキサゴンが回転を防止し、シングルクラウンのスクリー固定式テンポラリーの製作が可能です



ヘキサゴンがないため、複数に渡るスクリー固定式テンポラリーブリッジの製作が可能です。

| コネクション                                    | M                                                                                                                         | W                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ピーク印象キャップTG</p> <p>FスクリューTG付き</p>      |  <p>A-TG-MPSP-M</p>                      |  <p>A-TG-MPSP-W</p>                     |
| <p>チタン印象キャップ (角) TG</p> <p>FスクリューTG付き</p> |  <p>A-TG-MPST-M</p>                      |  <p>A-TG-MPST-W</p>                     |
| <p>チタン印象キャップ (丸) TG</p> <p>FスクリューTG付き</p> |  <p>A-TG-MPST-M-ROT</p>                 |  <p>A-TG-MPST-W-ROT</p>                |
| <p>FスクリューTG</p> <p>1個入り<br/>10個入り</p>     |  <p>A-TG-VM-180<br/>A-TG-VM-180-10</p> |  <p>A-TG-VM-200<br/>A-TG-VM-200-10</p> |

PEEKの技術的な特徴については、プレミアムインプラントカタログP.66をご参照ください。

フィクセーションスクリュー推奨トルク: 20-25 Ncm.

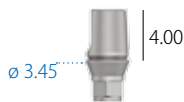
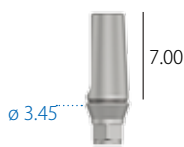
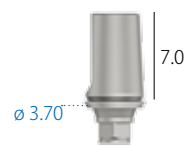
特に記載がない場合は、全てmmで記載しております。

## TGストレートポスト

TGストレートポストは、アクセスホールよりHSMシリーズのスクリュードライバーを使用し締め付けてください。



**ヘキサゴン：**  
インプラントの内部ヘキサゴンにより  
位置を固定し回転を防止します。

| コネクション                                 | M                                                                                                                    | W                                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TG ストレートポスト<br>高さ 4 mm<br>FスクリューTG付き   | <br>A-TG-MR-M-40                    | <br>A-TG-MR-W-40                   |
| TG ストレートポスト<br>高さ 7 mm<br>FスクリューTG付き   | <br>A-TG-MR-M-70                    | <br>A-TG-MR-W-70                   |
| TGストレートポスト<br>鋳造POMキャップ<br>(角)<br>POM製 | <br>A-TG-CAPCM-M                   | <br>A-TG-CAPCM-W                  |
| TGストレートポスト<br>鋳造POMキャップ<br>(丸)<br>POM製 | <br>A-TG-CAPCM-M-ROT              | <br>A-TG-CAPCM-W-ROT             |
| FスクリューTG<br><br>1個入り<br>10個入り          | <br>A-TG-VM-180<br>A-TG-VM-180-10 | <br>A-TG-VM-200<br>A-TG-VM-200-10 |

POMの技術的な特徴については、プレミアムインプラントカタログP.65をご参照ください。

備考：TGストレートポストは、スクリューリテインのためインプラントレベルで印象採得してください。

注意：口腔内に最終的に補綴物を装着する際は、新しいスクリューで締め付けてください。

フィクセーションスクリュー推奨トルク値: 20-25 Ncm.

特に記載がない場合は、全てmmで記載しております。



### TGアングルポスト

グレード5チタンのTGアングルポストは、インプラントショルダー上に設置します。

15° または20° の角度補正が可能です。

また、20° アングルポストでは、スクリュー固定の上部構造を製作することもできます。



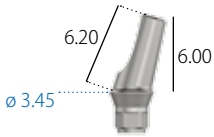
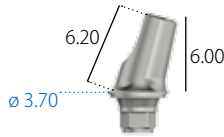
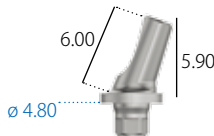
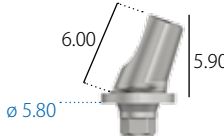
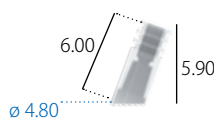
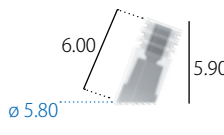
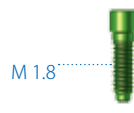
#### アングルポスト:

フィクセーションスクリューを使用し  
連結します。15°または20°の角度補  
正が可能です。

#### 20° アングルポスト:

上部構造をスクリュー固定できます。

ヘッドにあるM1.4のスレッドホールにポ  
ストスクリューを使用し、上部構造を固定  
します。

| コネクション                                         | M                                                                                                                    | W                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TGアングルポスト15°<br>FスクリューTG付き                     | <br>A-TG-MAR15-M-60                 | <br>A-TG-MAR15-W-60                |
| TGアングルポスト20°<br>FスクリューTG付き                     | <br>A-TG-MAPA20-M                   | <br>A-TG-MAPA20-W                  |
| TGアングル20°<br>鑄造スリーブ<br>PMMA<br>ポストスクリュー付き      | <br>A-TG-CC-MAPA-M                 | <br>A-TG-CC-MAPA-W                |
| FスクリューTG<br><br>1個入り<br>10個入り                  | <br>A-TG-VM-180<br>A-TG-VM-180-10 | <br>A-TG-VM-200<br>A-TG-VM-200-10 |
| ヘキサゴンアバットメント用<br>ポストスクリュー<br><br>1個入り<br>10個入り | <br>A-TG-VP-140<br>A-TG-VP-140-10 | <br>A-TG-VP-140<br>A-TG-VP-140-10 |

PMMA の技術的な特徴については、プレミアムインプラントカタログP.65をご参照ください。

注意：口腔内に最終的に補綴物を装着する際は、新しいスクリューで締め付けてください。

フィクセーションスクリュー推奨トルク値： 20-25 Ncm.

技工操作時に鑄造スリーブをスクリューで固定する場合、耐性が低いため6-8Ncm以上の力を加えないようにしてください。

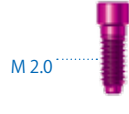
### チタンベース (TG)

カスタムアバットメントやインプラントブリッジを製作する場合のチタンベースです。  
プレミアムTGに対応しております。



**チタンベース：**

ミリング・焼成されたジルコニアフレーム／クラウンに装着されたチタンベースは、インプラントとパーフェクトな接合を可能にします。

| コネクション                        | M                                                                                 | W                                                                                  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| TG<br>チタンベース(角)<br>FスクリューTG付き |  |  |
|                               | A-TG-BASTZR-S-M-4                                                                 | A-TG-BASTZR-S-W-4                                                                  |
| FスクリューTG                      |  |   |
| 1個入り<br>10個入り                 | A-TG-VM-180<br>A-TG-VM-180-10                                                     | A-TG-VM-200<br>A-TG-VM-200-10                                                      |

注意：口腔内に最終的に補綴物を装着する際は、新しいスクリューで締め付けてください。

フィクセーションスクリュー推奨トルク値： 20-25 Ncm.

特に記載がない場合は、全てmmで記載しております。



**大信貿易株式会社**  
**DAISHIN TRADING CO.,LTD.**

本社〒592-8346 大阪府堺市西区浜寺公園町3-231-3

<http://www.daishintrading.co.jp>

大信受注センター

**tel.0120-382-118 fax.0120-089-118**

販売名：プレミアムインプラント ZirTi  
販売名：プレミアムチタンベース  
販売名：プレミアムTGインプラント ZirTi  
販売名：PAD用チタンベース  
販売名：スクリュードライバー  
販売名：プレミアム・コーノ・TGアナログ  
販売名：プレミアム・コーノ・TG印象キャップ  
販売名：チタン製プレミアム・コーノ・TG印象キャップ  
販売名：プレミアム・コーノ/TGトライインパーツキット  
販売名：ヘキサゴンアパットメント用印象パーツ  
販売名：PADアパットメント用キャリアー  
販売名：PADアナログ  
販売名：ピーク印象キャップ  
販売名：PAD鋳造用スリーブ  
販売名：TG鋳造用プラスチックコーピング

医療機器承認番号：22600BZX00088000  
医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002001  
医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002007  
医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002051  
医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002061  
医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002053  
医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002054  
医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002055  
医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002057  
医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002058  
医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002086  
医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002060  
医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002061  
医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002062  
医療機器製造販売届出番号：27B1X00041002063