

プレミアムSPインプラント サイナス

2つの異なったスレッド形状を持つØ5.0mmの円筒形のインプラントです。
このインプラントは、骨とインプラントの接触表面積を大幅に与え、上顎洞底挙上術（サイナスリフト）のためにデザインされた特別なインプラントです。


ベベル

プレミアムインプラントの歯冠側に広がるベベルは歯槽骨頂からインプラントの連結までの距離を水平方向に0.3mm、垂直方向に0.5mm離すことによって、スイッチングプラットフォームがインプラントの形状に与えられています。

コロナルスレッド

インプラント上部のスレッド部分はØ5.30mmと先端部分よりも大きく更にピッチ0.6mm、深さ0.4mmと細かい形状になっています。これは初期安定を高める効果があり、上顎洞皮質骨が薄い場合にもご使用いただけます。

インプラントサーフェイスは適切なサブトラクション法で処理しています。骨とインプラントの接触面積を大幅に与え、優れた初期安定性のあるZirTiサーフェイス処理を施しています。

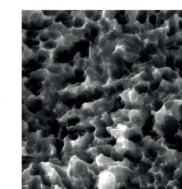


アピカルスレッド

インプラントの根尖部のスレッド部分は、ピッチ1.0mm、深さ0.4mmです。


丸みのある先端

上顎洞挙上部位に最適な形状をしています。
※丸みがあるためシュナイダー膜の損傷を軽減します。

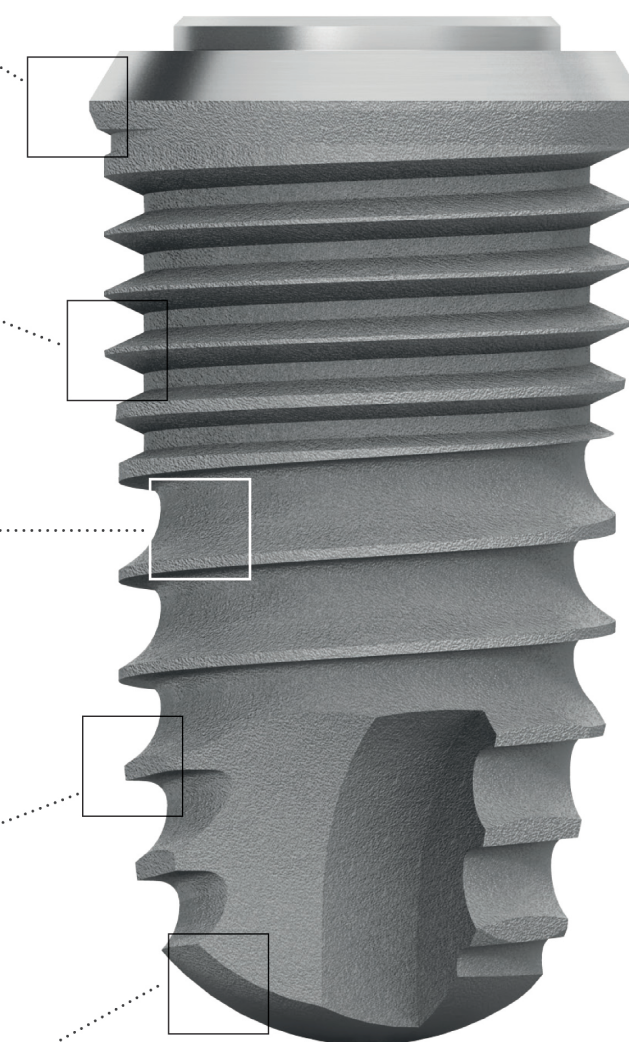


コレックスコネクション

インプラントには、ネック部のトップのエクスターナルカラーにより
連結時の安定性が得られ咬合力がフィクスチャー周囲全体に分散されます。
さらに補綴物との強固な連結をもたらし、動揺を軽減します。

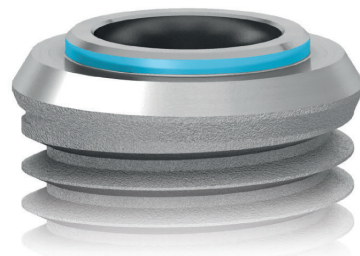

アノミカル形状の トランスジンジバルヒーリングキャップ



トランスジンジバルヒーリングキャップはØ7.00mmです。
レーザーマーカによりヒーリングキャップの直径と
エマージェンスプロファイルの高さを記載しています。

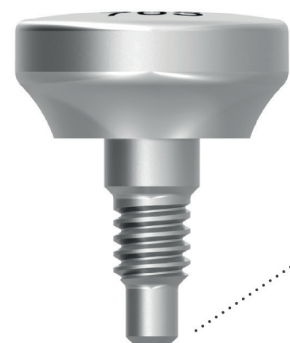

ガイディングシリンダー：
インプラントに取り付ける際のガイドとして位置を正確に誘導します。

補綴物装着のための内部ヘキサゴン

インプラント内部が見えやすいため、補綴物を容易に装着できます。
また60°の角度と深さ約2.0mmの連結部により回転防止と正確さが確保されます。

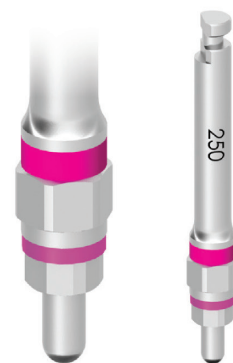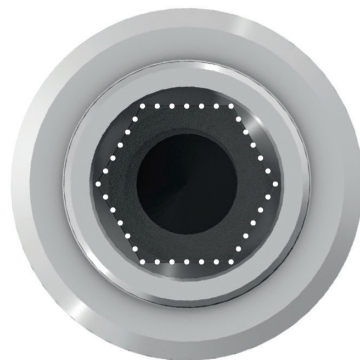

マウンターなしの外科処置


インプラントの埋入外科術式は、非常にシンプルです。
このインプラントにマウンターは必要ありません。
インプラントの連結部の角の変形を引き起こさず、
滅菌バイアルからインプラントを簡単に取り外しすることができます。

ワイドサージカルカバースクリュー

スクリューヘッドは、スウェーデン&マルティナの
スクリュードライバーと互換性があります。
ワイドサージカルカバースクリューは、
プレミアムSPサイナスインプラントに含まれています。



最大Ø7.0mmです。

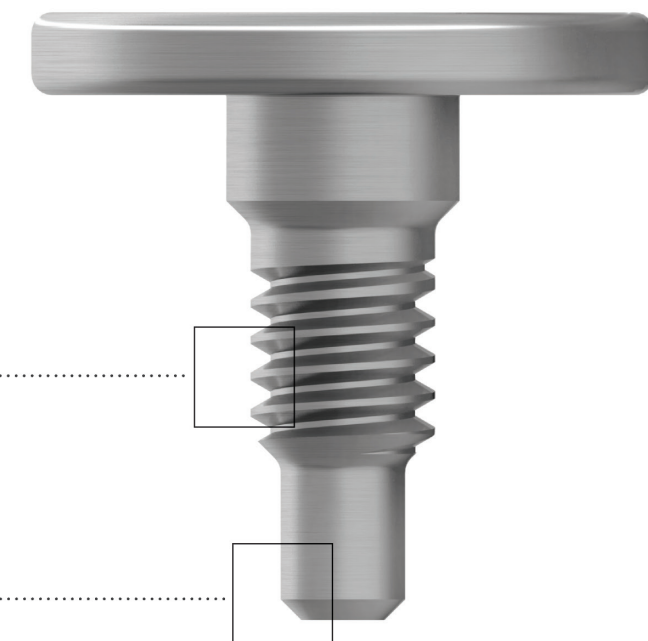

スレッドはØ2.0mmです。

ガイディングシリンダーは、
インプラントに取り付ける際のガイドとして
位置を正確に誘導します。